


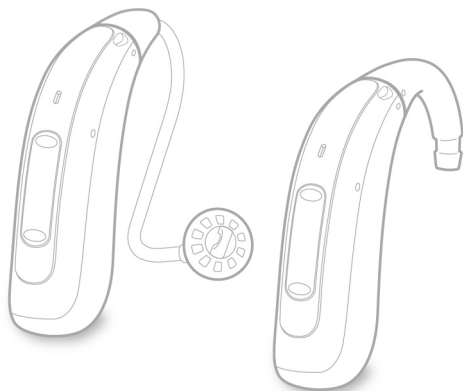

Motion C&G P X

Vodič za korisnike



Made for

 iPhone | iPad | iPod

Sadržaj

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Dobrodošli | 4 |
| Vaši slušni aparati | 5 |
| Tip aparata | 5 |
| Upoznavanje slušnih aparata | 6 |
| Komponente i nazivi | 6 |
| Kontrole | 9 |
| Slušni programi | 10 |
| Karakteristike | 10 |
| Svakodnevna upotreba | 11 |
| Punjenje | 11 |
| Uključivanje i isključivanje | 12 |
| Prebacivanje u režim pripravnosti | 14 |
| Umetanje i skidanje slušnih aparata | 15 |
| Podešavanje jačine zvuka | 19 |
| Promena slušnog programa | 20 |
| Dodatna podešavanja (opciono) | 20 |
| Posebne situacije slušanja | 21 |
| Telefoniranje | 21 |
| Prenos zvuka pomoću iPhone uređaja | 22 |
| Režim rada u avionu za slušne aparate | 22 |
| Zvučne indukcijske petlje | 23 |

| | |
|---|-----------|
| Održavanje i čuvanje | 24 |
| Slušni aparati | 24 |
| Umeci i cevčice | 26 |
| Profesionalno održavanje | 29 |
| Važne informacije o bezbednosti | 30 |
| Dodatne informacije | 33 |
| Bezbednosne informacije | 33 |
| Dodatna oprema | 33 |
| Uslovi rada, transporta i skladištenja | 33 |
| Informacije o odlaganju na otpad | 35 |
| Simboli korišćeni u ovom dokumentu | 35 |
| Otklanjanje problema | 36 |
| Informacije specifične za određenu zemlju | 37 |
| Servis i garancija | 39 |

Dobrodošli

Hvala što ste izabrali naše slušne aparate da vas prate kroz svakodnevni život. Biće vam potrebno malo vremena da se upoznate sa njim, kao i sa svačim novim.

Ovo uputstvo, zajedno sa podrškom vašeg specijaliste za sluh, pomoći će vam da shvatite prednosti i veći kvalitet života koje nude vaši slušni aparati.

Da biste dobili najviše koristi od vaših slušnih aparata, preporučljivo je da ih nosite svaki dan po ceo dan. To će vam pomoći da se naučite na njih.



OPREZ

Važno je temeljno i potpuno pročitati korisnički priručnik i bezbednosna uputstva. Poštujte bezbednosne informacije kako biste izbegli oštećenja ili povrede.



Pre prve upotrebe vaših slušnih aparata, potpuno ih napunite. Sledite uputstva u korisničkom uputstvu za punjač.

Vaši slušni aparati

i Ovo korisničko uputstvo opisuje opciona svojstva koja vaš slušni aparat možda ima ili nema.

Zamolite vašeg specijalistu za sluh da ukaže na svojstva koja su važeća za vaše slušne aparate.

Tip aparata

Vaši slušni aparati su modeli BTE (Behind-The-Ear) za nošenje iza uva. Cevčica prenosi zvuk od slušnog aparata u uvo. Aparati nisu namenjeni za decu mlađu od 3 godine ili osobe sa razvojnoum starosti ispod 3 godine.

Čelija za napajanje (litijum-jonska punjiva baterija) je trajno ugrađena u vaš slušni aparat. Time se omogućava jednostavno punjenje uz pomoć našeg standardnog ili opcionog punjača, Dry&Clean Charger.

Bežična funkcionalnost omogućava napredne audiološke funkcije i sinhronizaciju između dva vaša slušna aparata.

Vaši slušni aparati sadrže Bluetooth® low energy* tehnologiju koja omogućava laku razmenu podataka sa pametnim telefonom i jednostavan prenos zvuka pomoću iPhone uređaja**.

* Reč i logotipi Bluetooth su vlasništvo Bluetooth SIG, Inc., a svaka upotreba tih zaštitnih znakova od strane zvaničnog proizvođača je pod licencama. Drugi zaštitni znakovi i robne marke su u vlasništvu samih vlasnika.

** iPad, iPhone i iPad touch su zaštitni znakovi kompanije Apple Inc., koja je registrovana u SAD-u i drugim zemljama.



Upoznavanje slušnih aparata

Preporučuje se da bolje upoznate svoje nove slušne aparate. Uzmite aparate u ruke i pokušajte da upotrebite kontrole da biste zapamtili njihov položaj na aparatu. To će vam olakšati da osetite i pritisnete kontrole za vreme nošenja slušnog aparata.



Ako imate problem da pritisnete kontrole slušnih aparata tokom nošenja, možete se obratiti svom specijalisti za sluh za informaciju da li je dostupna opcija sa daljinskim upravljačem ili aplikacija za smart telefon za kontrolisanje vaših aparata.

Komponente i nazivi

Vaši slušni aparati se pričvršćuju na ušni držač i prilagođeni umetak ili standardnu cevčicu (ThinTube) i standardni umetak (LifeTip).





-
- | | |
|---|------------------------|
| ① Ušni umetak | ⑤ Cevčica iza uva |
| ② Cevčica (ThinTube) | ⑥ Kontakti za punjenje |
| ③ Otvori mikrofona | ⑦ Indikator strane |
| ④ Preklopni prekidač (kontrola, prekidač za uključivanje/isključivanje) | |
-

Možete koristiti standardne umetke zajedno sa standardnom cevčicom ili prilagođene umetke zajedno sa ušnim držačem i cevčicom.

Možete lako zameniti standardne umetke i očistiti standardnu cevčicu. Pročitajte više u odeljku „Održavanje i čuvanje“.



Standardni instrumenti/cevčice za uši Veličina



Instant otvaranje



Instant vrh



ThinTube

Prilagođeni umeci



Primeri:



Kontrole

Na primer, pomoću preklopnog prekidača možete da menjate programe za slušanje. Stručnjak za sluh je na preklopnom prekidaču programirao vaše željene funkcije.

| Funkcija preklopnog prekidača | L | R |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Pritisnite nakratko: | | |
| Program naviše/naniže | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Povećanje/smanjivanje jačine zvuka | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Povećavanje/smanjivanje nivoa terapijskog signala za tinitus | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| TV strimovanje uključeno/isključeno | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Pritisnite oko 2 sekunde: | | |
| Program naviše/naniže | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Povećanje/smanjivanje jačine zvuka | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Povećavanje/smanjivanje nivoa terapijskog signala za tinitus | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| TV strimovanje uključeno/isključeno | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Pritisnite duže od 3 sekunde: | | |
| Uključivanje/isključivanje | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

L = levo, R = desno



Takođe, možete koristiti daljinski upravljač da biste promenili slušne programe i podesili jačinu zvuka za vaše slušne aparate. Sa našom aplikacijom za pametni telefon imate još više upravljačkih opcija.



Slušni programi

1

2

3

4

5

6

Pročitajte više u odeljku „Promena slušnog programa“.

Karakteristike

- Funkcija za tretiranje tinitusa** generiše zvuk da vas odvraća od vašeg tinitusa.



Svakodnevna upotreba

Da bismo vam pružili udoban i lak način korišćenja vaših slušnih instrumenata, oni su opremljeni ugrađenim kontrolnim elementom. Pored toga nudimo i aplikaciju za Android, kao i za iPhone telefone, što olakšava rukovanje vašim uređajima. Obratite se stručnjaku za sluh za preuzimanje i instaliranje aplikacije za pametni telefon.

Punjenje

Možete da izaberete dve opcije za punjenje: Standardni punjač samo za punjenje ili opcioni punjač, Dry&Clean Charger.

Stavite svoje slušne aparate u punjač.

- ▶ Pratite uputstva u vodiču za korisnike punjača. U korisničkom uputstvu za punjač možete da nađete i korisne savete za punjenje.





Indikator prazne baterije

Oglasiće se zvučni signal koji ukazuje da je baterija prazna. Signal će se ponoviti svakih 20 minuta. Zavisno od upotrebe vaših slušnih aparata, imate približno 1,5 sati da napunite slušne aparate pre nego što prestanu da rade.

Imajte na umu da se vreme izvršavanja ćelije za napajanje smanjuje ako se istovremeno koristi previše funkcija.

Uključivanje i isključivanje

Slušni aparati se uključuju i isključuju na sledeće načine.



Preko punjača:



- ▶ Uključivanje: Izvadite aparate iz punjača.

Zvuk pokretanja se reprodukuje u vašim slušnim aparatima. Postavljaju se **predefinisana** jačina zvuka i slušni program.

- ▶ Isključivanje: Stavite slušne aparate u punjač.

Imajte na umu da punjač mora da bude povezan sa izvorom napajanja. Za detalje pogledajte korisničko uputstvo za punjač.



Pomoću preklopnog prekidača:

- ▶ **Uključivanje:** Pritisnite i držite donji deo preklopnog prekidača dok početna melodija ne počne da svira. Pustite preklopni prekidač dok melodija još svira.



Postavljeni su **fabrički zadani** jačina zvuka i program za slušanje.

- ▶ **Isključivanje:** Pritisnite i nekoliko sekundi držite gornji ili donji deo preklopnog prekidača. Čuje se melodija za isključivanje.



Pogledajte i savete za punjenje u vodiču za korisnike punjača.

Prebacivanje u režim pripravnosti

Pomoću daljinskog upravljača ili aplikacije na pametnom telefonu, možete da stavite slušne instrumente u režim pripravnosti. Ovo isključuje zvuk na slušnim instrumentima. Kada napustite režim pripravnosti, postavljaju se **prethodno** korišćena jačina zvuka i programi.

Napomena:

- U stanju pripravnosti, slušni instrumenti **nisu** potpuno isključeni. Oni i dalje vuku nešto struje.

Zbog toga preporučujemo da koristite režim pripravnosti samo u kratkom vremenskom periodu.

- Ako želite da izađete iz režima pripravnosti, ali vam daljinski upravljač ili aplikacija nisu pri ruci: Isključite svoje slušne aparate i ponovo ih uključite (pomoću preklopnog prekidača ili kratkim stavljanjem u punjač dok jedna ili više LED dioda ne zasvetli). U ovom slučaju, podešavaju se **podrazumevana** jačina zvuka i program za slušanje.

Umetanje i skidanje slušnih aparata

Slušni aparati su fino podešeni za vaše levo i desno uvo. Oznake u boji označavaju stranu:

- crvena oznaka = desno uvo
- plava oznaka = levo uvo




Umetanje slušnog aparata:

- ▶ Držite cevčicu blizu umetka.
- ▶ Pažljivo gurnite umetak u ušni kanal ①.
- ▶ Malo okrenite tako da se dobro uglavi.

Otvorite i zatvorite usta da biste izbegli sakupljanje vazduha u ušnom kanalu.

- ▶ Podignite slušni aparat i prevucite ga preko gornjeg dela uha ②.

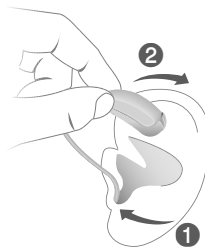

OPREZ

Opasnost od povrede!


- ▶ Umetnite ušni uložak pažljivo i ne preduboko u uvo.

i


- Može biti korisno umetnuti **desni** slušni aparat **desnom** rukom, a **levi** slušni aparat **levom** rukom.
- Ako imate problema sa umetanjem umetka, drugom rukom lagano povucite ušnu školjku nadole. Na taj način se otvara ušni kanal i olakšava umetanje umetka.

Opcioni element za zadržavanje pomaže u čvrstom zadržavanju ušnog umetka u vašem uvu. Da biste postavili opcionu element za zadržavanje:

- ▶ Poravnajte kraj elementa za zadržavanje sa pravim krajem prijemnika.

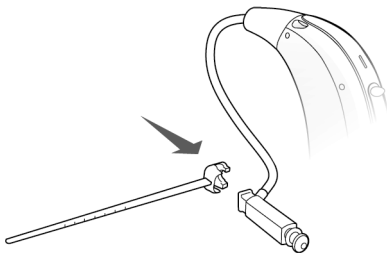

- ▶ Zatim pritisnite element za zadržavanje prema prijemniku dok ne klikne u položaju.

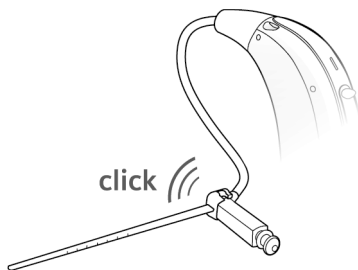


Da biste pozicionirali element za zadržavanje:

- ▶ Savijte element za zadržavanje i postavite ga pažljivo u dno ušne školjke (pogledajte sliku).



Uklanjanje slušnog aparata:

- ▶ Podignite slušni aparat i prevucite ga preko gornjeg dela uva ①.
- ▶ Držite cevčicu blizu umetka i pažljivo izvadite umetak ②.

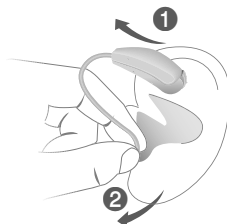

OPREZ

Opasnost od povrede!

- ▶ U veoma retkim slučajevima, ušni uložak može ostati u uhu prilikom skidanja slušnog aparata. U tom slučaju, obratite se lekaru specijalisti radi skidanja ušnog uložka.

Vaše slušne aparate očistite i osušite posle upotrebe.
Više o tome pročitajte u odeljku „Održavanje i čuvanje“.



Podešavanje jačine zvuka

Vaši slušni aparati automatski prilagođavaju jačinu zvuka situaciji u kojoj se sluša.

- ▶ Ako više volite ručno podešavanje jačine zvuka, pritisnite gornji deo preklopnog prekidača da biste povećali jačinu zvuka ili pritisnite donji deo da biste smanjili jačinu zvuka.

Pogledajte odeljak „Kontrole“ za postavku vašeg preklopnog prekidača.

Opcioni signal može da ukaže na promenu jačine zvuka. Kada se dostigne maksimalna ili minimalna jačina zvuka, možete da čujete ton opcionog signala.





Promena slušnog programa

Zavisno od situacija slušanja, vaši slušni aparati automatski podešavaju svoj zvuk.

Vaši slušni aparati takođe mogu da imaju nekoliko slušnih programa koji omogućavaju da menjate zvuk, ako treba. Opcioni signal može ukazivati na promenu programa.

- ▶ Da biste promenili program za slušanje, nakratko pritisnite preklopni prekidač.

Pogledajte odeljak „Kontrole“ za postavku preklopnog prekidača. Pogledajte odeljak „Programi za slušanje“ za listu programa za slušanje.

Primenjuje se podrazumevana jačina zvuka.



Dodatna podešavanja (opciono)

Takođe možete koristiti kontrole slušnog aparata za promenu drugih funkcija, na primer, nivo signala za tretiranje tinitusa.

U odeljku „Kontrole“ pogledajte podešavanje vaših kontrola.



Posebne situacije slušanja

Telefoniranje

Kada telefonirate, telefonsku slušalicu podignite malo iznad uha. Slušni aparat i telefonska slušalica moraju da budu poravnati. Telefonsku slušalicu malo zakrenite tako da uho ne bude potpuno pokriveno.



Telefonski program

Kada koristite telefon odgovaraće vam određena jačina zvuka. Obratite se svom specijalisti za sluh da konfigurirše telefonski program.

- ▶ Prebacite se na telefonski program kad god telefonirate.

Ako je telefonski program konfigurisan za vaše slušne aparate, to je navedeno u odeljku „Slušni programi“.



Prenos zvuka pomoću iPhone uređaja

Vaši slušni aparati su **Made for iPhone**. To znači da možete primiti telefonske pozive i slušati muziku sa vašeg iPhone uređaja direktno na vašim slušnim aparatima.

Za više informacija o kompatibilnim iOS uređajima, uparivanju, prenosu zvuka i drugim korisnim funkcijama, obratite se svom specijalisti za sluh.

Režim rada u avionu za slušne aparate

Režim rada u avionu je kada je Bluetooth vašeg slušnog aparata isključen. U oblastima u kojima korišćenje Bluetooth tehnologija nije dozvoljeno (npr. u nekim avionima), možete da deaktivirate Bluetooth režim. Ovo privremeno isključuje Bluetooth na vašim slušnim aparatima. Slušni aparati i dalje rade bez Bluetooth, ali direktan audio protok neće biti moguć a ostale funkcije neće biti dostupne.

- ▶ Da biste deaktivirali ili aktivirali Bluetooth režim, koristite aplikaciju pametnog telefona.

Ton upozorenja ukazuje na to kada je Bluetooth režim deaktiviran ili aktiviran.



Zvučne induksijske petlje

Kod nekih telefona i javnih mesta, kao što su pozorišta, dostupan je zvučni signal (muzika i govor) preko zvučne induksijske petlje. Uz pomoć tog sistema, vaši zvučni aparati mogu direktno da primaju željeni signal – bez ometajućih zvukova iz okruženja.

Sisteme zvučnih induksijskih petlji možete obično da prepoznate pomoću određenih znakova.



Uvek kada se nalazite na mestu sa zvučnom induksijskom petljom:

- ▶ Prebacite se na program telekalema.

Ako je za vaše slušne aparate konfigurisan program telekalema, to je navedeno u odeljku „Programi slušanja”.

Telecoil program i daljinski upravljač



OBAVEŠTENJE

Aparati koji se povezuju bežičnim putem:

Kada je telecoil program aktivan, daljinski upravljač može uzrokovati pulsirajući zvuk.

- ▶ Daljinski upravljač koristite na rastojanjima većim od 10 cm (4 inča).

Održavanje i čuvanje

Da biste sprečili oštećenje, važno je da se brinete o slušnim aparatima i sledite nekoliko osnovnih pravila koja će uskoro postati deo vaše svakodnevne rutine.

Slušni aparati

Čišćenje

Vaši slušni aparati imaju zaštitnu oblogu. Međutim, ako ih ne čistite redovno, možete da oštetite slušne aparate ili da izazovete telesnu povredu.

- ▶ Svakodnevno čistite slušne aparate mekanom, suvom maramicom.
- ▶ Nemojte da čistite uređaje pod mlazom vode i nemojte da ih uranjate u vodu.
- ▶ Nikada ne primenjujte pritisak tokom čišćenja.
- ▶ Nemojte da koristite alkoholne rastvarače na kontaktima za punjenje.
- ▶ Da biste izbegli koroziju, koristite mekanu i suhu maramicu da uklonite znoj ili tečnost sa kontakata za punjenje ili slušnih aparata pre nego što ih ubacite u punjač.
- ▶ Pitajte stručnjaka za sluh da vam preporuči proizvode za čišćenje, posebne komplete za negu ili da vam pruži više informacija o održavanju slušnih aparata u dobrom stanju.





Sušenje

Zatražite od zdravstvenog stručnjaka za sluh preporuke za proizvode za sušenje i pojedinačna uputstva za vreme sušenja slušnih aparata.

Skladištenje

- **Kratkoročno skladištenje (do nekoliko dana):** Isključite svoje slušne instrumente pomoću preklopnog prekidača ili ih stavite u punjač uključen u struju.

Punjač mora biti priključen na napajanje strujom. Ako punjač nije priključen na napajanje strujom, a vi stavite svoje slušne instrumente u punjač, slušni instrumenti se **ne** isključuju.

Imajte na umu da kada isključite slušne instrumente putem daljinskog upravljača ili pametnog telefona, slušni instrumenti se **ne** isključuju do kraja. Oni su u režimu pripravnosti i još i dalje vuku nešto struje.

- **Dugoročno skladištenje (nedelje, meseci,...):** Prvo, do kraja napunite svoje slušne instrumente. Isključite ih pomoću preklopnog prekidača pre nego što ih uskladištite. Preporučujemo korišćenje proizvoda za sušenje prilikom skladištenja slušnih instrumenata.

Da biste izbegli nepovratno dubinsko pražnjenje ćelije za napajanje, moraćete da puniti slušne instrumente u intervalima od 6 meseci. Ćelije za napajanje kod kojih je došlo do dubinskog pražnjenja ne mogu više biti ponovo napunjene i moraju da se zamene. Preporučujemo dopunjavanje u intervalima češćim od svakih 6 meseci.



Pridr avajte se uslova za skladištenje iz odeljka
„Uslovi rada, transporta i skladištenje“ .

Umetci i cev ice

Cerumen (ušni vosak) mo e da se akumulira na
umecima. To mo e uticati na kvalitet zvuka.

- Slušni aparati sa standardnom cev icom (ThinTube):

Umetke  istite svaki dan, a cev ice  istite po potrebi.

Zamenite umetke i cev ice otprilike svakih tri do
šest meseci ili ranije ako primetite pukotine ili druge
promene.

- Za slušne aparate sa ušnim dr a em:


Umetke  istite svaki dan.

Zatra ite od svog specijaliste za sluh da vam o isti
cev ice ili zameni umetke i cev ice po potrebi.

Čišćenje ušnih umetaka

- ▶ Očistite ušni umetak nakon uklanjanja mekom i suvom krpom.

Time ćete sprečiti da se cerumen osuši i stvrdne.

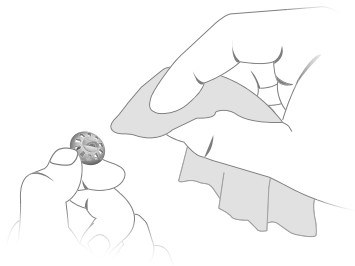


- ▶ Nemojte čistiti uređaj pod mlazom tekuće vode i nemojte da ga uranjate u vodu.

i Opcioni punjač Dry&Clean Charger koristi UV svetlost za čišćenje i sušenje cevčica i ušnih umetaka prilikom punjenja slušnih aparata. Obratite se stručnjaku za sluh za više informacija o tome koje je rešenje najbolje za vas.

Zamena standardnih ušnih umetaka (LifeTip)

- ▶ Izvadite upotrebljeni ušni umetak i ubacite novi.

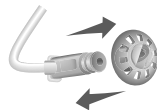

Zamena standardnih cevčica

- ▶ Odvijte korišćenu cevčicu sa slušnog aparata.



Zavrnite novu cevčicu.



Profesionalno održavanje

Vaš specijalista za sluh može izvršiti temeljno profesionalno čišćenje i održavanje.

Prilagođene umetke i filtere za vosak prema potrebi mora zameniti specijalista za sluh.

Obratite se svom specijalisti za sluh za pojedinačne preporuke za intervale održavanja i za podršku.



Važne informacije o bezbednosti

Ovaj odeljak sadrži važne bezbednosne informacije koje se odnose na ćeliju za napajanje. Za dodatne informacije o bezbednosti pogledajte priručnik za bezbednost koji je priložen uz slušne instrumente.



UPOZORENJE

Punjiva litijum-jonska baterija je trajno ugrađena u vaš uređaj. Nepravilna upotreba uređaja može prouzrokovati pucanje litijum-jonske punjive baterije.

Rizik od povrede, požara ili eksplozije!

- ▶ Pratite bezbednosna uputstva za litijum-jonsku punjivu bateriju u ovom odeljku.



UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

- ▶ Priključite punjač samo pomoću USB kablom koji je u saglasnosti sa IEC 60950-1 i/ili IEC 62368-1.



UPOZORENJE

- ▶ Pridržavajte se uslova za rad.
- ▶ Posebno obratite pažnju kako biste zaštitili svoj uređaj od ekstremne toplote (npr. vatra, mikrotalasna pećnica, indukciona pećnica ili druga visokoindukciona polja) i sunčeve svetlosti.
- ▶ Punite svoje slušne instrumente samo pomoću odobrenog punjača. Obratite se stručnjaku za sluh za podršku.
- ▶ Nemojte da rastavljate uređaj.
- ▶ Nemojte da koristite uređaj u eksplozivnom okruženju.
- ▶ Nemojte da koristite uređaje koji su deformisani ili koji poseduju vidna oštećenja.
- ▶ Nemojte da koristite uređaj ako su njegove performanse nakon punjenja značajno smanjene. Vratite uređaj stručnjaku za sluh.
- ▶ Nemojte bacati uređaj u vatru ili vodu.



UPOZORENJE

- ▶ Zamenu i popravku mora da vrši stručno lice.
Zato:
- ▶ Nemojte sami da popravljate ili menjate litijum-jonsku punjivu bateriju.
- ▶ Malo je verovatno da će punjiva litijum-jonska baterija pući ili eksplodirati, ali držite sve zapaljive materijale podalje.

U bilo kom od navedenih slučajeva, vratite svoje uređaje stručnjaku za sluh.

Dodatne informacije

Bezbednosne informacije

Za bezbednosne informacije pogledajte priručnik o bezbednosti koji je isporučen sa uređajem.

Dodatna oprema

Možete koristiti smartphone app za praktično daljinsko upravljanje vaših slušnih aparata. Aplikacija takođe omogućava da deaktivirate zvučne signale, kreirate pojedinačne zvučne profile i još mnogo toga.

Takođe, možete koristiti daljinski upravljač.

Za više informacija obratite se svom specijalisti za sluh.

Uslovi rada, transporta i skladištenja

Slušni instrumenti rade u sledećim ekološkim uslovima (takođe važi i za period između korišćenja):

| Uslovi rada | Pražnjenje | Punjenje |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| Temperatura | 0 do 50 °C (32 do 122 °F) | 10 do 35 °C (50 do 95 °F) |
| Relativna vlažnost | 5 do 93% | 20 do 75% |
| Atmosferski pritisak | 700 do 1060 hPa | 700 do 1060 hPa |

Tokom dužih perioda transporta i skladištenja pridržavajte se sledećih uslova:

| | Skladištenje | Transport |
|--|-------------------------------|--------------------------------|
| Temperatura (preporučena) | 10 do 25 °C (50 do 77 °F) | -20 do 60 °C (-4 do 140 °F) |
| Temperatura (maksimalni raspon) | 10 do 40 °C (50 do 104 °F) | -20 do 60 °C (-4 do 140 °F) |
| Relativna vlažnost (preporučena) | 20 do 80% | 5 do 90% |
| Relativna vlažnost (maksimalni raspon) | 10 do 80% | 5 do 90% |
| Atmosferski pritisak | 700 do 1060 hPa | 700 do 1060 hPa |

Imajte na umu da slušne instrumente morate da puniti najmanje svakih 6 meseci. Preporučujemo da se slušni instrumenti pune svaka 3 meseca. Za pojedinosti pogledajte odeljak „Održavanje i čuvanje“.

Za druge delove, kao što je punjač, mogu se primenjivati i drugi uslovi.



UPOZORENJE


Opasnost od povreda, požara ili eksplozije tokom transporta.


- ▶ Litijumske baterije i slušne aparate transportujte u skladu sa lokalnim propisima.


Informacije o odlaganju na otpad


- ▶ Da bi se izbeglo zagađenje životne sredine, baterije ili slušne aparate nemojte bacati u kućni otpad.
- ▶ Reciklirajte ili odložite baterije ili slušne aparate na otpad u skladu sa lokalnom propisima.

Simboli korišćeni u ovom dokumentu

 Ukazuje na situaciju koja bi mogla dovesti do ozbiljnih, umerenih ili manjih povreda.

 Ukazuje na moguću materijalnu štetu.

 Savet i predlozi u vezi sa boljim korišćenjem uređaja.

Made for
 iPhone | iPad | iPod

„Made for iPhone“, „Made for iPad“ i „Made for iPod“ znači da je elektronski dodatak posebno dizajniran da se poveže na iPhone, iPad, ili iPod i da je odobren od strane programera da zadovolji Apple standarde performansi. Apple nije odgovoran za rad ovog uređaja niti za njegovu usklađenost sa bezbednosnim standardima i propisima. Imajte na umu da upotreba ove dodatne oprema sa iPhone, iPad ili iPod uređajem ili može da utiče na performanse bežične veze.

Otklanjanje problema

Problem i moguća rešenja

Zvuk je slab.

- Povećajte jačinu zvuka.
 - Punjenje slušnog aparata.
 - Očistite ili zamenite ušni umetak.
-

Iz slušnog aparata se čuje pištanje.

- Ponovo ubacite slušni umetak tako da čvrsto nalegne.
 - Smanjite jačinu zvuka.
 - Očistite ili zamenite ušni umetak.
-

Zvuk je izobličen.

- Smanjite jačinu zvuka.
 - Punjenje slušnog aparata.
 - Očistite ili zamenite ušni umetak.
-

Slušni aparat emituje tonove signala.

- Punjenje slušnog aparata.
-

Slušni aparat ne radi.

- Uključite slušni aparat.
 - Punjenje slušnog aparata. Pogledajte i LED lampice statusa na punjaču.
-

Posavetujte se sa stručnjakom za sluh ako naiđete na dodatne probleme.

Informacije specifične za određenu zemlju

SAD i Kanada

Informacije o sertifikaciji za slušne aparate sa bežičnom funkcijom:

Motion C&G P X

- HVIN: RFM002
- Sadrži FCC ID: SGI-RFM002
- Sadrži IC: 267AB-RFM002



Servis i garancija

Serijski brojevi

Levo:

Desno:

Datumi servisiranja

1:

4:

2:

5:

3:


6:


Garancija


Datum kupovine:

Garantni period u mesecima:

Vaš specijalista za sluh



 **Zvanični proizvođač**
WSAUD A/S
Nymoellevvej 6
3540 Lyngø
Denmark



Document No. 04230-99T01-8100 BHS
Order/Item No. 109 908 47
Master Rev01, 10.2020
© 11.2020, WSAUD A/S. All rights reserved



CE
0123

www.signia-hearing.com